






# Bedieningsunit

## Foutmeldingen (LED status knippert rood)

<b>Accu leeg</b>	LED 1 knippert	
<b>Fout aandrijfunit / accu</b>	LED 1 & 5 knipperen	
<b>Fout bedieningsunit / kabel CU</b>	LED 2,3 & 4 knipperen	
<b>Fout elektronica aandrijfunit</b>	LED 1,2,3 & 4 knipperen	
<b>Fout temperatuur</b>	LED 1,3 & 5 knipperen	
<b>Fout bij het laden</b>	LED 1-5 knipperen	



Gedetailleerde informatie via [Intellion](#)