



E-PILOT

ELEKTRISCHE AANKOPPELBIKE

**SPEED
UP
YOUR
LIFE.**

ERVAAR HET DESIGN

De eerste indruk is overtuigend. De nieuwe e-pilot elektrische aankoppelbike maakt uw rolstoel binnen enkele seconden een sportief voertuig. Het vraagt slechts een paar eenvoudige stappen om de e-pilot aan uw rolstoel te bevestigen. Het zoeken naar een parkeerplaats of de vervelende transfer in en uit de auto zal niet meer nodig zijn. Het stevige frame, de geïntegreerde batterij en het krachtige aandrijfwiel zorgen voor een sportief design met uitstekende ergonomie. Het grote voorwiel zorgt ervoor dat u eenvoudig hobbels en obstakels kunt nemen, zoals stoepranden. Kortom: de e-pilot biedt een milieuvriendelijk mobiliteitsalternatief met maximaal rijplezier!



■ ■ ■ MADE IN GERMANY






JUST KEEP
ON GOING



E

■ ■ ■

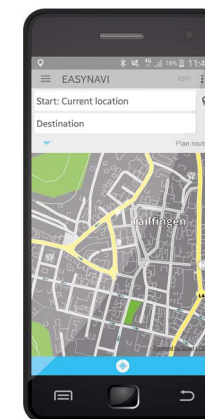

Navigeren naar uw bestemming met de rolstoeltoegankelijke EasyNavi is een van de opties die het Mobility Plus pakket aanbiedt. Meer informatie hierover kunt u vinden op pagina 16.

MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Maak een uitstapje naar de stad, bezoek vrienden of ga even met de hond naar buiten: de e-pilot maakt het mogelijk. Zelfs langere afstanden zijn geen probleem dankzij de sterke batterij. Wanneer u uw bestemming bereikt, koppel de e-pilot eenvoudig los en gebruik vervolgens uw manuele rolstoel zoals gewoonlijk.





**JUST
MASTER
YOUR WAY.**



GENIET VAN DE **VRIJHEID**

De e-pilot biedt u een nieuwe vorm van mobiliteit. Dankzij het grote voorwiel kunt u uw opties verder uitbreiden: een zandweg of kinderkopjes vormen geen obstakel meer. Zelfs over een stoeprand rijden, vormt geen probleem. Overschrijd uw huidige grenzen en geniet van uw vrijheid!





JUST
FASTER...



BEN SNELLER!

Het Mobility Plus Pakket brengt u sneller naar uw bestemming. Dankzij de combinatie van de Mobility Plus App en de smartphone, krijgt u toegang tot een rolstoelvriendelijke navigatie en een snelheidsuitbreiding tot 20 km/u. De Cruise Control zorgt voor een ontspannende rijervaring.

MOBILITY PLUS PAKKET FUNCTIES



Speed: Max. rijnsnelheid tot 20 km/u¹⁾



Cruise: Uw ingestelde snelheid behouden



easyNavi: Navigatie voor rolstoelgebruikers



Phone: Telefoon: Oproepen op de display²⁾

Het Mobility Plus Pakket bevat handleidingen en een licentiecode om de extra functies in de gratis Mobility App te ontgrendelen.³⁾

Voor Android en IOS



¹⁾ De maximale toegestane snelheid op de openbare weg hangt af van de lokale verkeersregels. Alber en zijn verkoopspartners zijn niet aansprakelijk in geval van niet-naleving van de nationale verkeerswetgeving.

²⁾ Enkel met Android.

³⁾ Het enige wat u nodig hebt, is een smartphone met internetaansluiting en Bluetooth.



MOBILITY PLUS PAKKET:

HANDIGE FUNCTIES

WANNEER U OP PAD BENT




SPEED

- Verhoog de maximale rij snelheid tot 20 km/u ¹⁾
- Nieuwe dynamische rij-ervaring met de e-pilot




CRUISE

- Een ingestelde snelheid behouden
- Eenvoudig instelbaar in stappen van 1 km/u

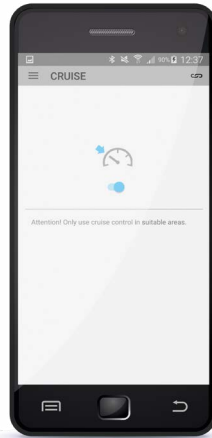

EASYNABI

- Eenvoudige navigatie met rolstoeltoegankelijke routekeuzes
- De eerste geïntegreerde navigatie in een aankoppelmotor

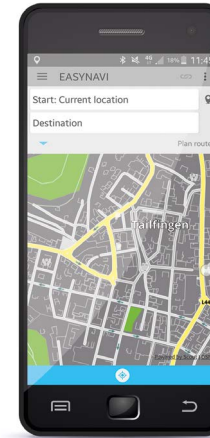

¹⁾ De maximale toegestane snelheid op de openbare weg hangt af van de lokale verkeersregels. Alber en zijn verkooppartners zijn niet aansprakelijk in geval van niet-naleving van de nationale verkeerswetgeving.

DE E-PILOT MOBILITY APP

DE SLIMME HULP WANNEER U OP PA D BENT


Download de Mobility App op uw smartphone ²⁾ en krijg toegang tot heel veel informatie in één oogopslag. Daarnaast bevat de Mobility App waardevolle tips en tricks voor het dagelijks leven met uw e-pilot.

GIDS:

- Beknopte gebruiksaanwijzingen
- Informatie over fouten met oplossing suggesties
- Lijst met gespecialiseerde dealers wereldwijd

COCKPIT: ²⁾


- Toont het resterend vermogen en de actieradius
- Tour computer
- Registratie van een afgelegde afstand

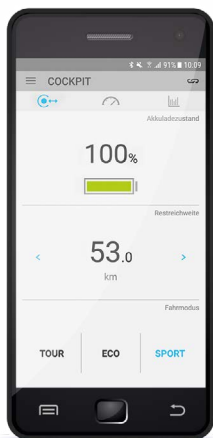

Gratis Download

²⁾ Het enige wat u nodig hebt, is een smartphone met internetaansluiting en Bluetooth.

Apple en App Store® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple inc.
Google en Google Play® zijn geregistreerde handelsmerken van Google inc.

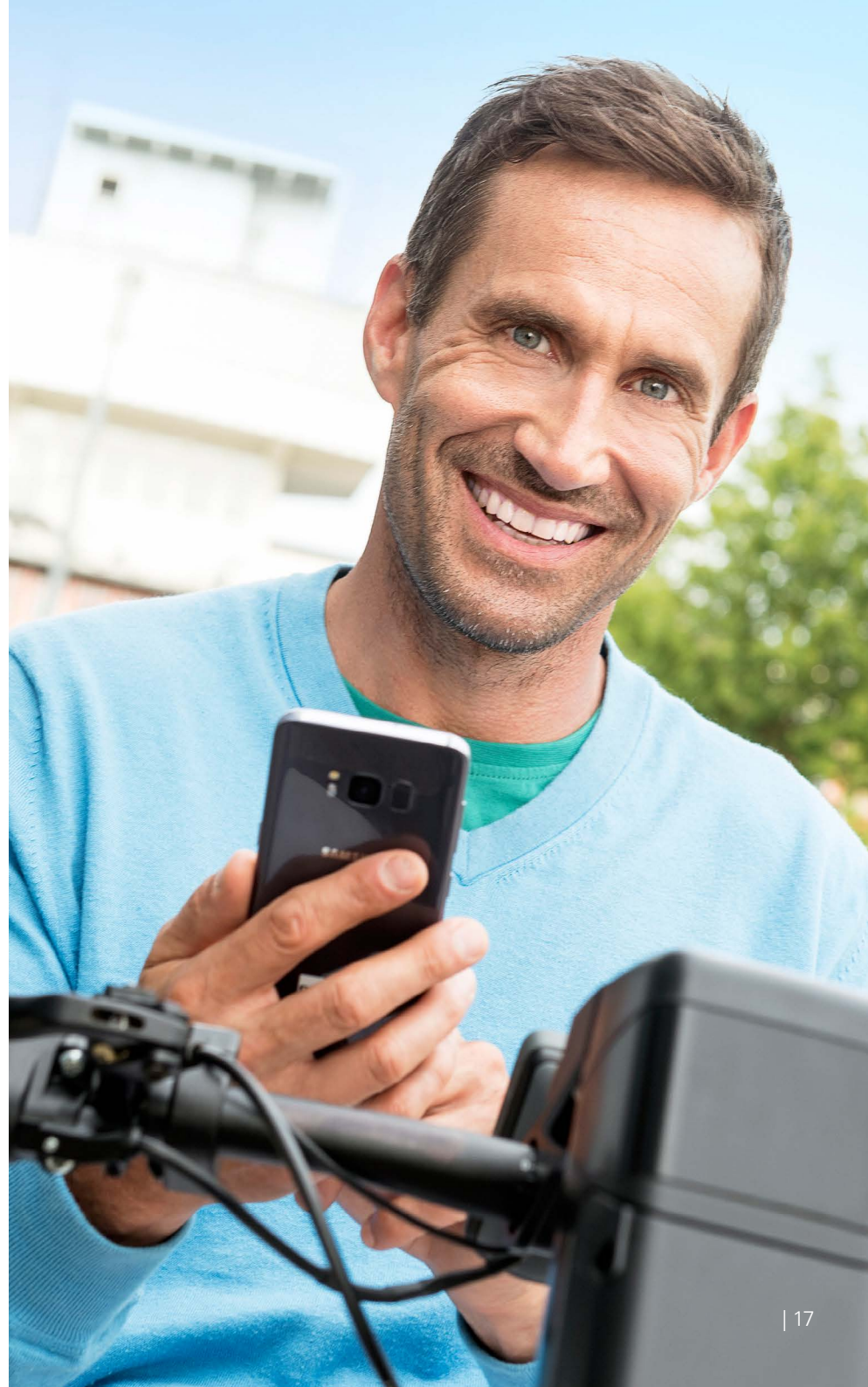

PERSONALISEER UW E-PILOT

Het sportief, dynamisch uiterlijk van de e-pilot wordt benadrukt door de aantrekkelijke designkleuren. Personaliseer uw e-pilot volgens uw wensen en voorkeuren. Alle beschikbare kleuren¹⁾ zijn te vinden op www.alber.nl.






¹⁾ Kleuren kunnen enigszins afwijken van de hier afgebeelde voorbeelden. We behouden ons het recht om de kleureselectie te wijzigen op basis van beschikbaarheid.

MOGELIJKE UITBREIDINGEN

Zelfs in de standaardversie biedt de e-pilot vele handige functies, zoals twee remmen, verlichting, claxon, eenvoudig afneembaar batterijpakket, USB-aansluiting voor het opladen van uw smartphone. Met een brede keus aan accessoires, kunt u uw e-pilot aanpassen aan uw behoeften. Ontdek alle accessoires op www.alber.nl.

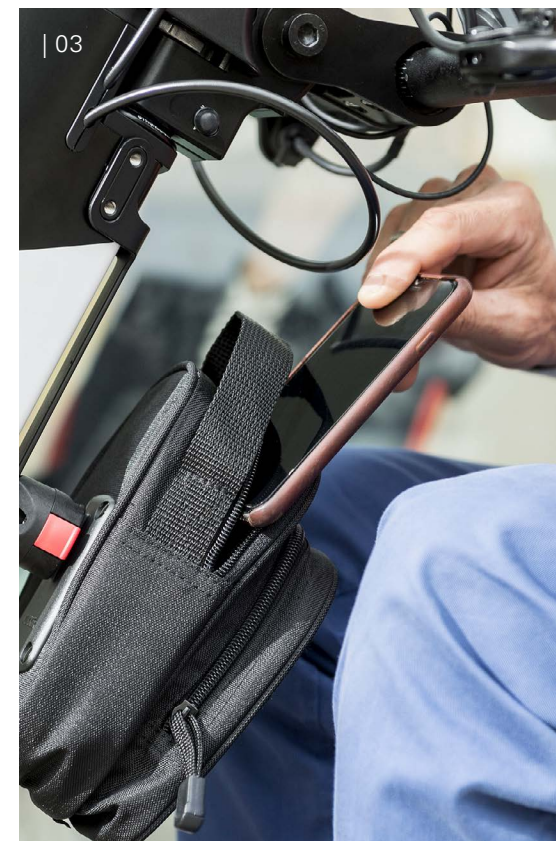

ACCESSOIRES




01 | Boodschappentas 02 | Supernova voorlicht 03 | Compacte tas
04 | Handsteun Klep 05 | Veiligheidspakket 06 | Achteruitkijkspiegel
07 | Achterlicht voor duwhandgrepen 08 | Flessenhouder
09 | Vario Drager

DETAILS

Bevestig eenvoudig met de rolstoel

Het modulair montagesysteem maakt de combinatie met verschillende rolstoelmodellen mogelijk. Bevestig de e-pilot eenvoudig aan uw rolstoel.

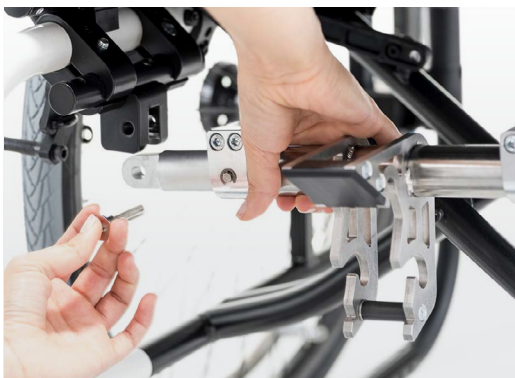

Adapter om de e-pilot aan de rolstoel te bevestigen

De zwarte aansluitingen zijn bevestigd aan de zitbuizen van de rolstoel. De koppelingssteun is afneembaar. Uw rolstoel blijft opvouwbaar. Afhankelijk van het type rolstoel, blijft er ongeveer 600 tot max. 900 gram op de rolstoel over.



Koppel en ontkoppel in twee stappen:

KOPPEL EN ONTKOPPEL IN SLECHTS
5 SECONDEN



1. Trek naar binnen en vergrendel het op zijn plaats.




2. Druk naar voren om de positie te vergrendelen en ga.

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. gebruikersgewicht	100 kg
Max. belastend gewicht (stoel en gebruiker)	135 kg
Max. helling	tot 10%
Remvermogen	tot 15%
Rijsnelheid ¹⁾	0,5 – 20 km/u: Standaardsnelheid 6 km/u of 10 km/u.
Actieradius Afhankelijk van het grondoppervlak, het gewicht van de persoon, temperatuur en terrein	tot 50 km
Totale gewicht	18.4 kg
Totale gewicht zonder accu	15.5 kg

¹⁾ De maximale toegestane snelheid op de openbare weg hangt af van de lokale verkeersregels.
Alber en zijn verkooppartners zijn niet aansprakelijk in geval van niet-naleving van de nationale verkeerswetgeving.

CE Voldoet aan de EU Richtlijn inzake Medische Hulpmiddelen 93/42/EWG

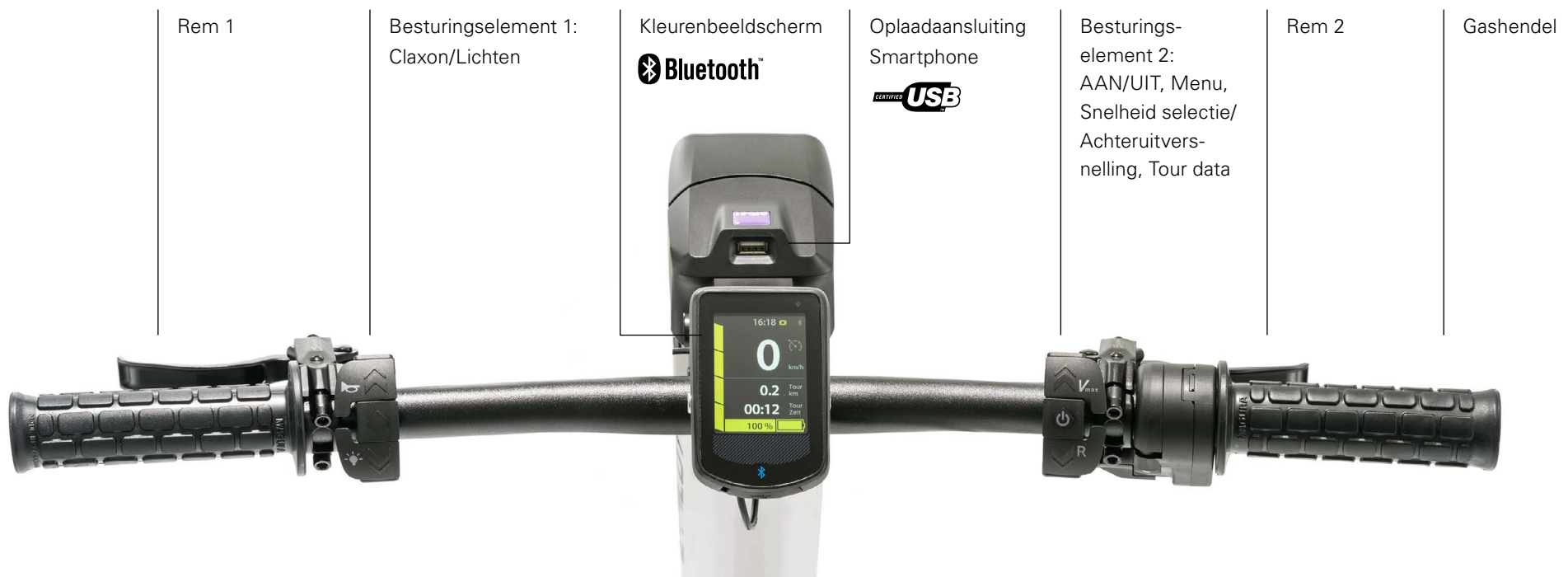

■ ■ ■ MADE IN GERMANY



Geproduceerd in Duitsland door de marktleider in hulpaandrijvingen voor rolstoelen.

U KUNT OP DE E-PILOT VERTROUWEN

De e-pilot is een product van het bedrijf Alber, de specialist op het vlak van draagbare en gebruiksvriendelijke mobiliteitshulpmiddelen. Onafhankelijke instellingen hebben de e-pilot getest en beoordeeld op duurzaamheid, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Veiligheidstesten staan bij ons op de eerste plaats – bijvoorbeeld door de TÜV: bij Alber ontvangt u altijd geteste productveiligheid volgens de meest recente richtlijnen voor medische producten.

De e-pilot voldoet aan de Richtlijn 93/42/EEC en 2007/47/EC voor Medische Hulpmiddelen en is op vrijwillige basis getest door TÜV Süd, volgens de momenteel geldende versie van de productnorm EN 12184.

Onze kwaliteitseis: uw veiligheid! Ons bedrijf is gecertificeerd volgens de huidige norm voor kwaliteitsmanagement ISO 13485:2016 voor medische producten. Wij garanderen een milieuvriendelijke productie van onze producten met ons milieubeheersysteem gecertificeerd volgens ISO 14001.



INVACARE B.V.

Galvanistraat 14-3,
6716 AE Ede, Nederland
+31 (0)318 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

www.alber.nl