

In deze uitgave:

- Vendlet met Obesitas Bed
- Account Managers Care: deskundig advies
- Training "Zitten en Mobiliteit"
- Gebruiksvriendelijk kantelen
- Ontmoet Invacare!



Voorwoord

Voor u ligt alweer de 12de editie van ons Zorgbulletin: met herkenbare casussen uit de zorg en praktische oplossingen voor uitdagingen in praktijksituaties in de zorg.

In dit Zorgbulletin stellen wij onze Account Managers Care, Ageeth te Winkel en Ariadne Krommedam, aan u voor: een multidisciplinair team met een achtergrond in de zorg, dat u graag voorziet van deskundig advies.

Verder introduceren wij het nieuwe Vendlet V5S(+) systeem, dat ook geschikt is voor plaatsing op een obesitas bed. Dit zorgt voor een aanzienlijke verlichting van de fysieke belasting van verzorgenden

In het artikel „Gebruiksvriendelijk kantelen“ leggen we het belang van zwaartepuntsverplaatsing bij kantelrolstoelen uit.

Op de achterzijde vindt u een overzicht van alle evenementen waarop wij binnenkort aanwezig zullen zijn. Komt u ook naar één van deze dagen? Loop dan eens bij onze stand langs om kennis te maken met onze medewerkers en onze oplossingen.

Wilt u meer weten over één van de onderwerpen uit dit Bulletin, of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op. Dat kan via onderstaande telefoonnummers. Wij helpen u graag!



Jeske van Bruggen

Account Manager
Zorginstellingen
06 - 50 27 47 58



Elwin van Middendorp

Account Manager
Zorginstellingen
06 - 50 27 47 42



Ruud Pauw

Business Development
Manager
06 - 50 27 47 44



Ageeth te Winkel

Account Manager Care
06 - 57 58 86 24



Ariadne Krommedam

Account Manager Care
06 - 20 05 65 23



Han Geveke

Account Manager
Mobility
06 - 50 27 47 43



Frits Jaap Vos

Account Manager
Mobility
06 - 50 27 47 49

Probleemloos draaien in bed

Vendlet V5S+ in combinatie met het Invacare Octave Obesitas bed

Wat te doen wanneer een (bedlegerige) obesitas cliënt niet meer over voldoende lichaamsfuncties beschikt? Hoe deze dan te verzorgen in bed? Dit zijn moeilijke en vooral zware situaties. Hierbij kan Vendlet een oplossing zijn.

Vendlet is een elektrisch wentelsysteem waarmee de cliënt wordt verplaatst of gedraaid in bed zonder fysieke belasting van de zorgverlener. Het bestaat uit een glijlaken en een wentellaken, een handbediening en aan beide zijden van het bed gemotoriseerde zijhekken. Door het indrukken van de handbediening wordt het wentellaken gespannen en opgerold aan één van de zijhekken. Hierdoor wordt de cliënt verplaatst in bed.



met een maatje meer en een verzorger minder...

Vendlet wordt in toenemende mate gebruikt in intensieve zorgsituaties. Vendlet maakt het mogelijk dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen of met minder personeel verzorgd kunnen worden. Vendlet voorkomt fysieke overbelasting bij verzorgenden en is onmisbaar bij het voorkomen van rugklachten. De inzet van Vendlet bespaart kostbare tijd.

Naast deze voordelen is Vendlet zeer comfortabel voor de cliënt zelf. Voor de cliënten geeft het systeem een optimaal gevoel van veiligheid en voorkomt het onnodig aanraken en plotselinge stoten of rukken die pijn veroorzaken bij het draaien van de patiënt en draagt dus bij aan het voorkomen van decubitus.

Vandaag de dag is Vendlet ook het aangewezen product voor Obese cliënten, die voornamelijk worden verzorgd in bed, waarbij de verplaatsings- en werkprocedures moeilijk en zwaar zijn.

Vendlet V5S - nieuwe versie

De ontwikkeling van de nieuwe variant van het Vendlet V5 systeem is de Vendlet V5S. Het belangrijkste verschil is dat wanneer de lakenrollen naar boven worden gezet met de afstandsbediening, deze automatisch dienst doen als zijhek op het bed. Hierdoor is het niet meer noodzakelijk om separaat nog een veilige bedomgeving te creëren middels de additionele plexiglas panelen. Daarnaast is montage van het systeem een stuk eenvoudiger geworden. V5S maakt het de fysieke belasting een stuk minder bij het aanbrengen van een tilband, het verplaatsen van een cliënt van de ene zijde van het bed naar de andere en bij het mobiliseren van een cliënt.

Tegelijkertijd met de ontwikkeling van het vernieuwd Vendlet systeem V5S is het systeem ook geschikt gemaakt voor montage op het Invacare Octave obesitas bed (V5S+).

De Octave biedt een ideale werkomgeving voor verzorgenden. De constructie van het inlegraam zorgt ervoor dat de cliënt goed benaderd kan worden. Het hoofd- en voetenbord kunnen eruit gehaald worden, zodat de verzorgende gemakkelijk bij hoofd en voeten kan. Door gebruik in combinatie met het Vendlet V5S+ systeem wordt verzorging van de obese cliënt veel eenvoudiger en fysiek minder belastend.

Invacare Octave Obesitas bed

Het Invacare Octave Obesitas bed, met een maximaal belastbaar gewicht van 385 kg, kan vanaf heden ook uitgerust worden met de obese variant van het Vendlet V5S systeem: het Vendlet V5S+ systeem (belastbaar tot een gewicht van 400 kg).

Met een veilige werkbelasting van 385 kg is de Invacare Octave een technisch hoogstaand zorgbed dat mensen met een hoger gewicht optimaal ondersteunt in hun dagelijks leven. Met standaard een volledig elektrisch bediend 4-delig inlegraam, biedt de Octave optimaal comfort en perfecte ondersteuning.





Het Invacare Account

Als Account Managers Care zijn Ariadne Krommedam en Ageeth te Winkel verantwoordelijk voor de Invacare Care producten. Dit is de gehele lijn van hygiëne producten, bedden, matrassen en tilliften. De Care producten worden zowel thuis als in de zorginstellingen gebruikt.

Ariadne en Ageeth ondersteunen dealers, zorgwinkels en zorgprofessionals met passingen en een goed en compleet advies. De voorzieningen worden via de Zorgverzekeraars of WMO aan de eindgebruiker thuis verstrekt. De zorginstelling schaft deze voorzieningen aan via het eigen budget. In de verschillende zorgwinkels zijn eenvoudige voorzieningen van Invacare ook particulier te koop.

Ageeth te Winkel – achtergrond: verpleegkundige en onderzoeker

Ageeth te Winkel is in 1991 afgestudeerd als **verpleegkundige** en in 1994 heeft ze de studie **Algemene Sociale Wetenschappen** aan de Universiteit van Utrecht afgerond. Met de ervaring als verpleegkundige in de verschillende velden van de gezondheidszorg en als onderzoeker op het thema mobiliteit en inzet van verschillende hulpmiddelen voor cliënt en verpleegkundige heeft ze de overstap gemaakt naar het werken voor een fabrikant. **Eerst gespecialiseerd in hulpmiddelen voor de reductie van fysieke belasting bij verpleegkundigen en verzorgenden.** Daarna op het gebied van **continentie- en stomazorg binnen de revalidatie.** Naast de begeleiding van drie leuke pubers en het beoefenen van verschillende sporten is zij van maandag tot en met donderdag bereikbaar voor Noord-Oost en Zuid-Oost Nederland via **06 57 58 86 24** of **atwinkel@invacare.com**.

Wat is er zo leuk aan het werken bij Invacare?

„Als Account Manager Care werk ik met een breed assortiment. Dat maakt dat er voor iedere vraag een passende oplossing is. Wij hebben oplossingen voor 55 plussers die hun woning levensloopbestendig willen inrichten tot

hulpmiddelen die ervoor zorgen dat een klant met een grote zorgvraag zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. De pasvoorraad in mijn aanhangwagen wisselt dan ook iedere dag. Op deze manier kan ik samen met een ergotherapeut of adviseur alle hulpmiddelen uitproberen in de eigen omgeving van de cliënt.



Op andere dagen ben ik actief binnen de zorginstellingen. Dat kan een verpleeghuis, gehandicaptenzorginstelling of ziekenhuis zijn. Naast het adviseren en leveren van de verschillende oplossingen kan ik actief meedenken in bijvoorbeeld het beleid fysieke belasting of een bijdrage leveren aan het decubitusbeleid. Op deze manier worden de investeringen van de zorginstelling optimaal ingezet. **Voor mij geeft het veel voldoening als de voorziening bijdraagt aan goede zorg en comfort voor de cliënt en daarnaast de arbeidsomstandigheden van de professional optimaliseert.“**

Managers team Care: deskundig advies

Ariadne Krommedam – achtergrond: ergotherapeut

De van oorsprong in 1997 afgestudeerde **ergotherapeut** heeft veel ervaring in de verschillende organisaties ten aanzien van voorzieningen en behandelingen. Ariadne werkte voorheen bij meerdere leveranciers en fabrikanten met als **specialisme communicatie- en omgevingsbediening, scootmobielen en woningaanpassingen**. Ze werkte als stage coördinator en relatiebeheerder op de opleiding voor ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam en als hockeytrainer binnen verschillende verenigingen. Naast de zorg voor vier kinderen reist zij in West Nederland door het land. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Heb je directe vragen dan kun je met haar contact opnemen:

06 20 05 65 23 of **akrommed@invacare.com**.

Wat is je rol bij Invacare?

„Mijn functie is Account Manager Care. Een breed begrip! Want mijn dagen vullen zich met veel verschillende activiteiten. Ik kom veelal in aanraking met verzorgenden, verpleegkundigen en ergotherapeuten. Deze hebben vaak hele directe vragen uit de praktijk.

Daarnaast probeer ik mijn kennis en ervaringen te delen met allen die te maken hebben met fysieke belasting op de werkvloer. Niet alleen in instellingen, maar ook steeds vaker in de 1e lijn!”

Hoe gebruik je je ervaring als ergotherapeut bij je werkzaamheden?

„Het rugzakje van ergotherapeut draag ik altijd bij mij! In een vraaggerichte situatie ga ik vaak op pad met een door de ergotherapeut

voorgestelde voorziening. Het voordeel van mijn jaren lange ervaring met verschillende voorzieningen maakt dat je vanuit verschillende oogpunten de vraagstelling kunt benaderen.

Een directe vraagstelling zoals “ik kan niet draaien in bed” zou ik sec kunnen beantwoorden met de inzet van een Vendlet systeem. Dat is niet mijn werkwijze. **Ik ga dieper in op wat de eindgebruiker nog allemaal aan functionele vaardigheden heeft.** Wat hij reeds heeft geprobeerd (voorliggende) aan voorzieningen en handelingsaanpassingen. **Een voorziening moet echt van meerwaarde zijn voor de cliënt en/of voor diegene die zorg levert aan bed!**

Daarnaast kijk ik gedurende een passing altijd welke voorzieningen, omgevingsfactoren en activiteiten er in en rond het bed plaatsvinden. Vragen zoals; “Hoe kan ik mijn omgevingsbediening gebruiken als ik in bed lig?” of “Hoe kan ik na het wentelen in bed mijn cliënt goed positioneren?”, probeer ik gedurende de passing mee te nemen. Dit geeft de behandelend ergotherapeut de gelegenheid aspecten mee te nemen in haar totale advisering.

Ik behandel cliënten niet, maar help mee in de implementatie van de voorzieningen in het dagelijks handelen.”



Casuïstiek delen

Samenvattend: het Careteam is multidisciplinair. Zij leggen regelmatig casussen aan elkaar voor. Vanuit de verschillende invalshoeken bespreken ze mogelijke oplossingen voor de vraagstellingen.

Zij ontwikkelen en geven gezamenlijke trainingen aan verpleegkundigen, verzorgenden, behandelaren, studenten, mantelzorgers en accountmanagers en adviseurs van de dealers. Daarnaast zijn ze ook te vinden op vele beurzen en congressen – zie de agenda verderop in dit Zorgbulletin.

Gebruiksvriendelijk kantelen

Sommige cliënten ervaren het kantelen in een rolstoel als een enge ervaring, het geeft hun een angstig en onveilig gevoel – ze zijn bang achterover te kiepen met stoel en al. Daarnaast ervaren sommigen het als onhandig omdat hun knieën hoger komen te zitten waardoor het moeilijk is om aan tafels te zitten. In kantelrolstoelen zonder zwaartepuntsverplaatsing, verplaatst het zwaartepunt bij het kantelen naar achteren. Dit zorgt ervoor dat, om de stoel veilig te stellen tegen omkiepen, de achterwielen naar achteren gemonteerd moeten worden, waardoor de rolstoel zwaarder wordt om te duwen/rijden, maar ook dat de rolstoel eerder achterover kan vallen.


De kantelrolstoelen van Invacare hebben het DSS (Dual Stability systeem). Dit is een **zwaartepuntsverplaatsings mechanisme** dat beide genoemde problemen oplost. Zie in de afbeelding hiernaast hoe dit werkt: door het mechanisme gaat het zitgedeelte van de rolstoel naar voren en beneden.

Voordelen van DSS zijn:

- **Cliënt heeft niet meer het gevoel van achterover kiepen**, maar voelt nu dat hij/zij in de zitunit naar voren tussen het onderframe verschuift.
- De wielen kunnen relatief meer naar voren (omdat er geen omkiep risico is) en daarmee dichterbij het lichaam en dus beter bereikbaar voor de zelfrijder. **De rolstoel rijdt daardoor gemakkelijker en lichter.**

Stabieler met zwaartepuntsverplaatsing

Zo is er een test uitgevoerd met 2* kantelrolstoelen om dit te bewijzen: 1 kantelrolstoel zonder zwaartepuntsverplaatsing t.o.v. 1 met DSS. Deze test heet de “Tip Stability Test” (een test waarbij de stoel gekanteld wordt totdat deze valt). De resultaten waren overduidelijk: de stoel met DSS zwaartepuntsverplaatsing was significant stabiel, zowel in standaard positie als in kanteel positie. Zie tabel hiernaast

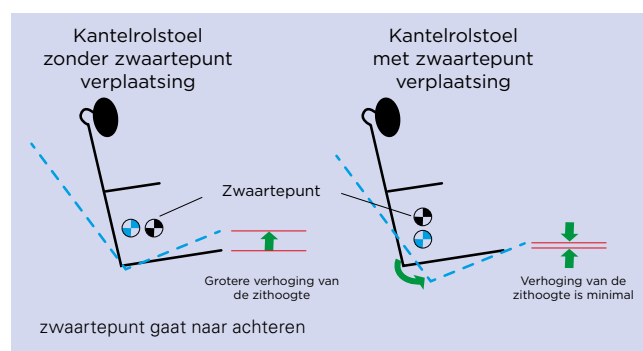

Wanneer valt een rolstoel om?	Zonder zwaartepuntsverplaatsing	Met zwaartepuntsverplaatsing (DSS)
Kantelrolstoel in standaard positie: Kanteling: 8° Rughoekverst.: 10°	17°	19°
Kantelrolstoel in kanteel positie: Kanteling: 20° Rughoekverst.: 22°	7,4°	17°

*beide met 16" wielen en 125 kg dummy



Ook gekanteld aan tafels zitten

Een ander voordeel van het DSS zwaartepuntsverplaatsings mechanisme is dat de zitting bijna niet verhoogt bij kanteling. Met als voordeel dat men goed aan tafel kan zitten, ook in gekantelde positie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het DSS mechanisme? Bekijk eens de video op YouTube Invacare Nederland hierover. Of neem contact op met Jeske van Bruggen of Elwin van Middendorp, zij laten u graag de **Invacare Rea Kantelrolstoelen zien met DSS: Clematis, Dahlia en Azalea Max.**

Hoeveel training heeft u gehad over het onderwerp “Zitten en Mobiliteit”?



EUROPEAN SEATING SYMPOSIUM
Incorporating Assistive Technology
www.seating.ie, info@seating.ie

Central
Remedial
Clinic

Van 13 tot 15 juni jongstleden vond in Dublin het European Seating Symposium plaats.

Circa 600 deelnemers (therapeuten, fabrikanten, dealers en gebruikers) uit heel Europa lieten zich tijdens ESS informeren over de laatste inzichten en mogelijkheden op het gebied van zitten en mobiliteit.

Rhona Moot, klinisch specialist bij Invacare, presenteerde tijdens ESS de uitkomst van een onderzoek naar onderwijs en training op het gebied van zitten en mobiliteit. Dit onderzoek is gehouden onder therapeuten en onderwijzers op dit vakgebied in Europa, de VS en Canada.

Belangrijkste uitkomsten van onderzoek onder o.a. ergotherapeuten:

- Bijna de helft van de respondenten heeft minder dan een hele dag les gehad in zitten en mobiliteit tijdens hun opleiding
- 65% van de respondenten gaf aan geen adequate training “on the job” te hebben gehad.

Om het kennisniveau op het gebied van zitten en mobiliteit te verhogen, geeft Invacare Nederland trainingen op dit gebied. Heeft u interesse in een dergelijke training? Neem dan contact op met Invacare via: 0318 69 57 57.



Invacare op ESS.

Ontmoet Invacare in het land!

De komende tijd is er gelegenheid om ons te ontmoeten en onze zorgoplossingen te zien en te bespreken. Maak onder andere kennis met het Vendlet wentelsysteem en Alber elektrische hulpaandrijvingen voor handbewogen rolstoelen.



31 oktober en 1 november
Nieuwegein
Gezond & Zeker
Kennisdagen



20 november
Utrecht
Nationale MS dag



4 november
Utrecht
Dag van de
Fysiotherapeut /
FysioExpo



22 en 23 november
Venlo
Landelijk Decubitus
Congres



1 december
Nieuwegein
MSMS dag

**HOU ONZE AGENDA IN DE GATEN!
NIEUWE GEACCREDITEERDE CURSUS
VOOR ERGOTHERAPEUTEN (5 PT):
„ELEKTRISCHE HULPAANDRIJVINGEN
VOOR HANDBEWOGEN ROLSTOELEN“**

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3, 6716 AE Ede, Nederland
+31 (0)318 69 57 57
nederland@invacare.com www.invacare.nl

© 2016 Invacare International Sàrl. Alle rechten voorbehouden.

Bulletin onder voorbehoud van fouten. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voor aankondiging.

Trusted Solutions, Passionate People

