

# Invacare® *Modulite*™

Individuele pasvorm en  
aanpassingsvermogen

NIEUW



Yes, you can.®




## Maximale flexibiliteit voor het aanpassen aan ieder individu

Het telescopische zitframe is een ingenieus ontwerp dat de basis vormt voor het Modulite™ zitsysteem. Het design biedt een breed scala aan positioneringsopties, waardoor het volledig kan worden aangepast aan de eisen van de eindgebruiker. Door de eenvoudige instelopties is Modulite™ eenvoudig te gebruiken door dealers en therapeuten.




### Modulaire voorzijde

Het modulaire uiteinde aan de voorkant garandeert de best mogelijke instellingen voor zowel laterale als centrale beensteunen.

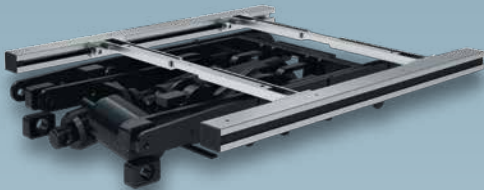

### Telescopisch binnenframe

Een geoptimaliseerde versie om op een kantel- en liftmodus te monteren. Dit verzekert de laagst mogelijke zithoogtes.

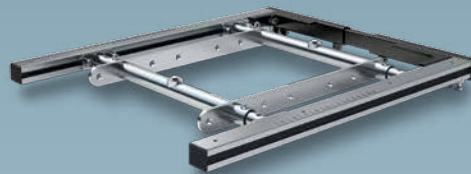


### Zijrails

Aan het telescopische zitframe, wat in breedte instelbaar is van 38-53 cm, is aan beide zijden een zijrails bevestigd. De zijrails maakt het mogelijk traploos de zitdiepte in te stellen, armsteunen te monteren en het is eenvoudig om accessoires te bevestigen.

## Kies uit een breed assortiment kussens

De Modulite™ beschikt over een breed scala aan ziteenheden en kussens, die gebruikt kunnen worden om meer comfort en een juiste positionering te verkrijgen.

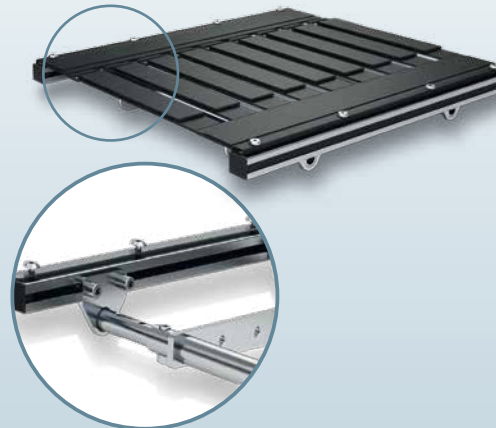

### Telescopisch zitframe met spanbanden

Het zitoppervlak kan eenvoudig worden aangepast aan het postuur van de gebruiker om een optimaal comfort en een aangepaste ondersteuning te bieden. Door de adapters wordt er 3 cm extra ruimte gecreëerd voor meer bewegingsvrijheid.



### Betaalbaar en flexibel

Voor gebruikers met minder complexe behoeftes is het startpunt van dit modulaire systeem de eendelige zitplaat, met geïntegreerde armleuningen en de mogelijkheid om beensteunen te bevestigen. Hoewel dit model veel eenvoudiger is in de configuratie, biedt het toch een uitzonderlijke flexibiliteit en kan het gecombineerd worden met een groot aantal opties die ook geschikt zijn voor de telescopische basis.



## Assortiment aan ziteenheden en



### Diepte- en breedteinstelbare zitunit

Deze driedelige zitplaat beschikt over alle mogelijke instellingen in diepte en breedte.



### Matrix® Flo-tech® zitkussens

Om aan de individuele behoefte te voldoen, wordt er met Modulite™ een extra range aan positioneringskussens aangeboden, waaronder de populaire Matrix® Flo-tech®.

## Opties voor zithoek en rugondersteuning

Modulite™ garandeert een grote mate van flexibiliteit als het op rugondersteuning aankomt. De rondgevormde rugbuizen, die in breedte instelbaar zijn, bieden de mogelijkheid om tal van rugsteunen te monteren. De zithoekinstelling gaat met een natuurlijke beweging dankzij het hoge draaipunt wat wrijvingskrachten minimaliseert.



### Uniek rugframe

De bevestiging van de rugbuizen beschikken over manuele instellingen en kunnen in diepte worden ingesteld door middel van de zijrails.



### Elektrische rugverstelling

De elektrische rugverstelling heeft een hoog draaipunt voor een natuurlijke houding. Bij deze optie wordt een extra in breedte instelbare steunbuis geïnstalleerd. Door het eenvoudige quick releasesysteem kan dit eenvoudig opgevouwen worden tijdens transport.



### Naspanbare rugbekleding

De rugbekleding kan aangepast worden aan verschillende lichaamstypes.



### Invacare® Matrix® ruggen

Dit aantrekkelijk assortiment aan ruggen is verkrijgbaar in meerdere designs. De verschillende rugtypes bieden optimale ondersteuning- en positioneropties.



### Rea® Flex3 rugsteun

De Flex3 rugsteun kan zowel in hoogte als breedte worden aangepast. De breedte instellingen komen overeen met de instellingen van het telescopische zitframe.




## Opties en accessoires



Zijdelings instelbare beensteunen



Zijdelings instelbare armleuningen

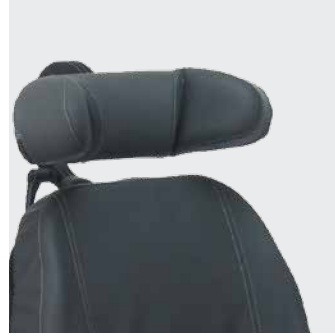

Hoofdsteen



Pelotten

## Technische data



380 mm, 430 mm<sup>1</sup>,  
480 mm,  
530 mm<sup>2</sup>



Traploos instelbaar,  
fabrieksinstellingen  
410, 460,  
510 mm



480 mm,  
540 mm,  
560 mm<sup>3</sup>



270 mm tot  
390 mm




90° tot 120°

- 1/ Vaste zitplaat
- 2/ Elke zitbreedte kan 50 mm extra breed gemaakt worden door instelling van de armleuningen
- 3/ **Flex3** zitplaten, verstelbaar in verschillende hoogtes tot 100 mm

## Zitbekleding



Lk bekleding

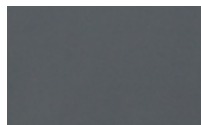

Dartex®



Matrix rugbekleding



Naspanbare bekleding



Pluche

(Beschikbare kleuren en bekledingstypes zijn afhankelijk van het type kussen)

## Rolstoelen met Modulite™



Invacare® **Bora**®



Invacare® **Kite**®



Invacare® **FDX**®



Invacare® **TDX SP**



Invacare® **Storm**®<sup>4</sup>



Invacare® **Storm**®<sup>4</sup> **X-plore**

Invacare B.V.  
Celsiusstraat 46 · 6716 BZ Ede  
Nederland  
Tel.: +31 (0) 318 - 695757  
Fax +31 (0) 318 - 695758  
Email: [nederland@invacare.com](mailto:nederland@invacare.com)  
[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

© 2013 Invacare International Sàrl  
Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie is correct tijdens de druk van deze brochure. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafkondiging.

Modulite - NL - 11/2013