

Invacare Slings



Optimale pasvorm en optimaal comfort



De sling range

De optimale pasvorm bieden

Onze nieuwe range liftmatten is ontworpen om een veilige, ondersteunde en comfortabele transfer voor de cliënt te bieden. Het aanbod omvat mogelijkheden in verschillende modellen, maten en materialen om er zeker van te zijn dat de liftmat perfect passend is voor elke individuele gebruiker, of deze nu beperkt mobiel is of volledige lichaamsondersteuning nodig heeft.

Ons team van experts en ergotherapeuten heeft de tijd genomen om de slings intuïtief en eenvoudig in gebruik te maken voor een zorgverlener. Dit zorgt voor minder benodigde aanlegtijd en meer vertrouwen.


De range bestaat uit vijftien modellen, elk verkrijgbaar in zes maten en tot drie materialen om uit te kiezen.

Deze indrukwekkende selectie garandeert dat er voor iedere gebruiker in iedere situatie een geschikte liftmat is; dagelijkse transfers van bed naar (rol)stoel, toilet transfer en ook voor gebruik bij douchen of baden.



4

BELANGRIJKE KENMERKEN

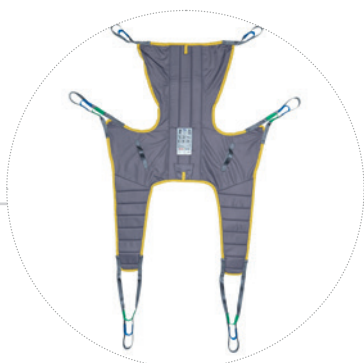

◀ Optimale pasvorm

- ▶ De juiste sling voor de juiste cliënt en transfertype
- ▶ Range met 15 modellen, 6 maten en 3 materialen
- ▶ Goed doordacht liftmat patroon voor ondersteuning van de juiste lichaamsonderdelen
- ▶ Alle slings hebben een lusbevestiging voor aan een juk

Meer veiligheid en vertrouwen ▶

- ▶ Aanleg-video's eenvoudig te bekijken via QR code
- ▶ Duidelijke labels met intuïtieve aanlegtekeningen
- ▶ Gecertificeerd en milieuvriendelijk brandvertragend materiaal voor de Comfort In Situ slings



◀ Optimaal comfort

- ▶ Zacht materiaal voor extra comfort
- ▶ Gepolsterde rug- en beensecties voor optimale gewichtsverdeling
- ▶ Zachte buffer onder het kwetsbare okselgebied

Eenvoudig aan te leggen ▶


- ▶ Positioneringsvak maakt het eenvoudig om met de hand tussen de liftmat en de rug van de cliënt te schuiven wanneer deze in de band zit
- ▶ Twee markeringen geven de positie over de ruggenwervel aan
- ▶ Gekleurde lussen voor eenvoudige keuze voor de juiste positionering



Het juiste model kiezen

Het belangrijkste doel bij het kiezen van een liftmat is om de lichaamsondersteuning te bieden die nodig is. Invacare slings zijn ontworpen om de gebieden waar lichaamscontrole en spiersterkte verminderd zijn te ondersteunen. De belangrijkste lichaamsdelen zijn de benen, heupen, romp en hoofd. Het volgende geeft een overzicht van welke slingmodel geschikt is bij welke fysieke mogelijkheden:

Beoordeling lichaamscontrole ▼

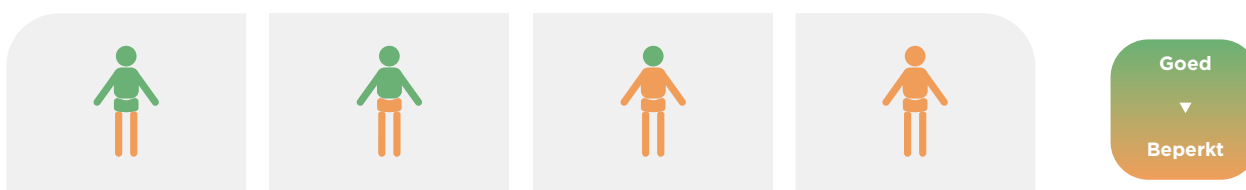

Lichaamsondersteuning per *Invacare Slings* model ▼

Zeer weinig ▼	Weinig ▼	Enigszins ▼	Volledig ▼	Beoogd gebruik
	Universal Low	Universal Standard	Universal High	Universal Standard
		Amputee	Universal High Plus	Minder optimaal*
		Easy-Fit	Comfort Standard	Optimaal
		Comfort In Situ	Comfort High	
Dress Toileting Low				
Dress Toileting High				
Light Transfer Support				
Standing Transfer Vest				
Standing Transfer Vest with Groin band				
Stand Assist				
Transfer Stand Assist				


*** Minder optimaal**
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de cliënt niet meer mogelijkheden heeft dan de liftmat laat gebruiken. Oftewel, dat hij/zij enige tijd geïmmobiliseerd wordt. Verder wordt er meer materiaal gebruikt dan nodig is wat het aanleggen lastiger maakt.

De juiste maat selecteren

Heupbreedte en rughoogte, gemeten in zittende positie, zijn de belangrijkste factoren bij het kiezen van de juiste maat liftmat. Voor slings met gordels is ook de buikomvang belangrijk.

Het gewicht van de cliënt moet vooral in de gaten worden gehouden voor het veilig belastbaar gewicht van de sling. Het is minder van belang voor de juiste maat sling.

Voor een volledig overzicht van de afmetingen per model en maat adviseren wij de Invacare Selectie Gids te raadplegen.

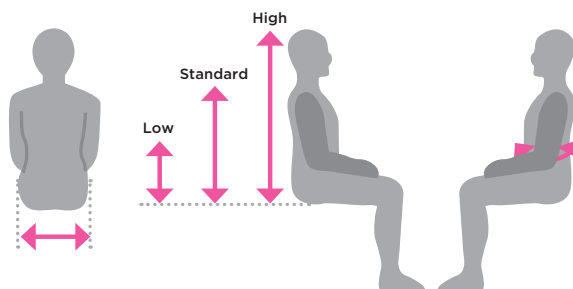

► Maat	XS	S	M	L	XL	XXL
► Veilig belastbaar gewicht	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	250 kg	300 kg

Invacare Slings voor passieve tilliften

Universal family

All-round slings voor dagelijkse handelingsroutines met een cliënt.



◀ Universal Low

- Ondersteunt de heupen en lage rug
- Geschikt voor mensen met een goede romp- en hoofdbalans
- Kan worden gebruikt voor transfers van zit-naar-zit



◀ Universal Standard

- Ondersteunt het hele lichaam, inclusief de schouders
- Geschikt voor diegenen met goede hoofdbalans
- Kan worden gebruikt voor transfers vanuit liggende positie, tilhandelingen vanaf de vloer en zit-naar-zit transfers



◀ Universal High

- Ondersteunt het hele lichaam, inclusief het hoofd
- Cliënt zit in licht achteroverhellende positie
- Geschikt voor diegenen met beperkte controle over het hoofd, de romp en de heupen
- Kan worden gebruikt voor transfers vanuit liggende positie, tilhandelingen vanaf de vloer en zit-naar-zit transfers



◀ Universal High Plus

- Zelfde kenmerken als de Universal High maar geeft cliënten ook de gelegenheid om hun armen buiten de sling te houden en meer interactief te zijn.

Slings met een kleinere opening

Voor cliënten die een liftmat met een kleinere opening nodig hebben.



◀ Amputee

- Ondersteunt de dijben en de romp
- Geschikt voor cliënten met een enkele of dubbele beenamputatie en een goede hoofdcontrole
- Niet geschikt als er risico op spasmes is
- Cliënt zit in licht achteroverhellende positie
- Kan worden gebruikt voor transfers van zit-naar-zit en van lig-naar-zit



◀ Easy-Fit

- Ondersteunt het hele lichaam en het hoofd
- Geschikt voor diegenen met beperkte controle over het hoofd, de romp en de heupen
- Gescheiden beenondersteuning maken het eenvoudiger aan te leggen dan Comfort slings
- Biedt een goede heuppositie zodat de klant relatief rechtop kan zitten

Slings met een grotere opening

Grote opening voor toiletgang en eenvoudig aanleggen.



◀ Dress Toileting Low

- Geschikt voor diegenen met controle over de heupen, de romp en het hoofd
- Gordel biedt meer ondersteuning rondom het lichaam en veilige positionering
- Kan worden gebruikt voor transfers van zit-naar-zit



◀ Dress Toileting High

- Zelfde eigenschappen als de Dress Toileting Low sling maar met extra hoofdsteun voor diegenen met verminderde hoofdcontrole

Comfort family

Hangmat stijl liftmatten, uitermate geschikt voor cliënten met chronische pijn. Deze sling is ook handig voor mensen met een beenamputatie boven de knie. De Comfort in Situ sling is de beste keuze wanneer de liftmat onder de cliënt moet blijven zitten na een transfer naar zittende positie.



◀ Comfort Standard

- Ondersteunt het hele lichaam
- Geschikt voor diegenen met goede hoofdcontrole
- Inclusief goed geplaatste grepen



◀ Comfort High

- Ondersteunt het hele lichaam, inclusief het hoofd
- Geschikt voor diegenen met beperkte controle over het hoofd, de romp en de heupen



◀ Comfort In Situ

- Ondersteunt het hele lichaam
- Geschikt voor diegenen met goede hoofdcontrole
- Ontworpen zonder grepen om onder de cliënt te kunnen blijven na transfer
- Gemaakt van speciaal gecertificeerd brandvertragend materiaal in alle drie de materialen; solid, spacer en net
- Milieuvriendelijk
- Third-party getest volgens EN 1021 deel 1 en 2



Tilbanden

Geschikt voor snelle transfers, op zichzelf staand of voor extra ondersteuning van een arm of been.



◀ Light Transfer Support

- Geschikt voor diegenen met goede lichaams- en hoofdcontrole
- Kan worden gebruikt voor zittende transfers
- Kan worden ingezet als tilband om een arm of been te ondersteunen indien nodig, ook als extra ondersteuning van een andere sling

Vest voor balans, staan en looptraining

Eenvoudig aan te leggen en weer weg te halen voor het verlichten van lichaamsgewicht voor de actievare cliënt.



◀ Standing Transfer Vest

- Aan te leggen rondom het bovenlichaam met de voeten van de cliënt stevig op de vloer
- Geschikt voor diegenen met enige stafunctie maar verminderde balans en/of loopmogelijkheid
- Accessoire: Liesbanden helpen de Standing Transfer Vest op zijn plaats te houden en bieden extra veiligheid

Invacare Slings voor actieve tilliften



◀ Stand Assist

- Geschikt voor cliënten die enig gewicht op hun benen kunnen dragen maar niet zelfstandig kunnen staan
- Cliënt moet cognitief goed zijn en een goede controle over lichaam en hoofd hebben
- Gepolsterd voor extra comfort
- Uitgevoerd met anti-slip materiaal op de rug



◀ Transfer Stand Assist

- Zelfde eigenschappen als de Stand Assist sling maar met extra beenondersteuning

Accessoires ▼



Verlenglussen

- ▲ Verleng de liftbanden voor meer positioneringsmogelijkheden. Verkrijgbaar in 20 cm en 30 cm lengte.




Lusmarkers

- ▲ Markeer de voorkeurslussen na een individuele inventarisatie. Wordt geleverd in een pak van vier stuks.

Maten & Materialen ▼


▼ Familie	▼ Modellen	▼ Maten						▼ Materialen		
		XS	S	M	L	XL	XXL	Solid	Net	Spacer
Universal	Universal Low	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
	Universal Standard	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
	Universal High	◆	◆	◆	◆	◆	◆	●	●	●
	Universal High Plus	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
Small Opening	Amputee	◆	◆	◆	◆	◆		●		
	Easy Fit	◆	◆	◆	◆	◆		●		●
Wide opening	Dress Toileting Low	◆	◆	◆	◆	◆		●		
	Dress Toileting High	◆	◆	◆	◆	◆		●		
Comfort	Comfort Standard	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
	Comfort High	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
	Comfort In Situ	◆	◆	◆	◆	◆	◆	●🔥	●🔥	●🔥
Lifting Bands	Light Transfer Support		◆		◆			●		
Standing/Walking training	Standing Transfer Vest	◆	◆	◆	◆	◆		●		
Active slings	Stand Assist	◆	◆	◆	◆	◆		●		
	Transfer Stand Assist		◆	◆	◆	◆		●		

Materialen ▼

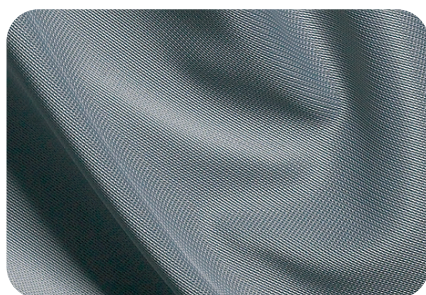


Polyester - Solid

▲ Een sterk materiaal dat slijtvast en gemakkelijk aan te leggen is. Het glijdt soepel op zijn plaats en droogt snel na het wassen. Dit materiaal is beschikbaar op alle modellen.

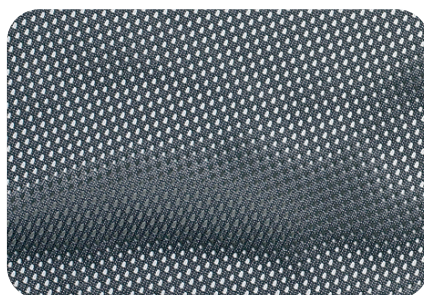

Polyester - Net

▲ Ook bekend onder de naam mesh. Het net materiaal is uiterst geschikt voor bad- en doucheomgevingen. Het is waterdoorlatend en sneldrogend.

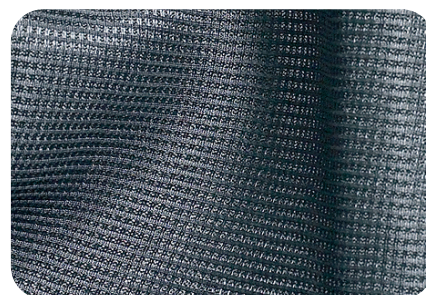

Spacer

▲ De ademende spacer stof is rekbaar naar twee kanten zodat het materiaal zich vormt naar de contouren van de cliënt. Dit resulteert in een hoge mate van comfort en ondersteuning.

Technische gegevens ▼

Meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op onze Invacare-website.



Max
gebruikersgewicht ▼



Max
wastemperatuur ▼



Bleken ▼



Wasdroger ▼

**Invacare
Slings**

XS, S, M, L = 200 kg
XL = 250 kg
XXL = 300 kg

90° C

Niet bleken

Lage temperatuur

Alle liftmatten moeten worden getest en aangepast aan de individuele cliënt voor optimaal comfort en veiligheid tijdens transfers.

Er moet een risico inventarisatie worden uitgevoerd voorafgaand aan het gebruik van een sling van de ene fabrikant aan een tillift van een andere fabrikant.

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland



Yes, you can.®