




Installatie en onderhoud van Etude bedden backup-accu's.

De accudoos is bevestigd op de twee geleiders op het beengedeelte van de motor en op de plaats geklikt met een bevestiging (A). De korte kabel van de accu is aangesloten op het beenmotorgedeelte (B) en vast gemaakt door een slot (C). De lange kabel van de accu is aan de bedieningskast op de rugsteunmotor (D) aangesloten, en het slot is geïnstalleerd.

Het LED lampje (E) brandt als de accu opgeladen moet worden.

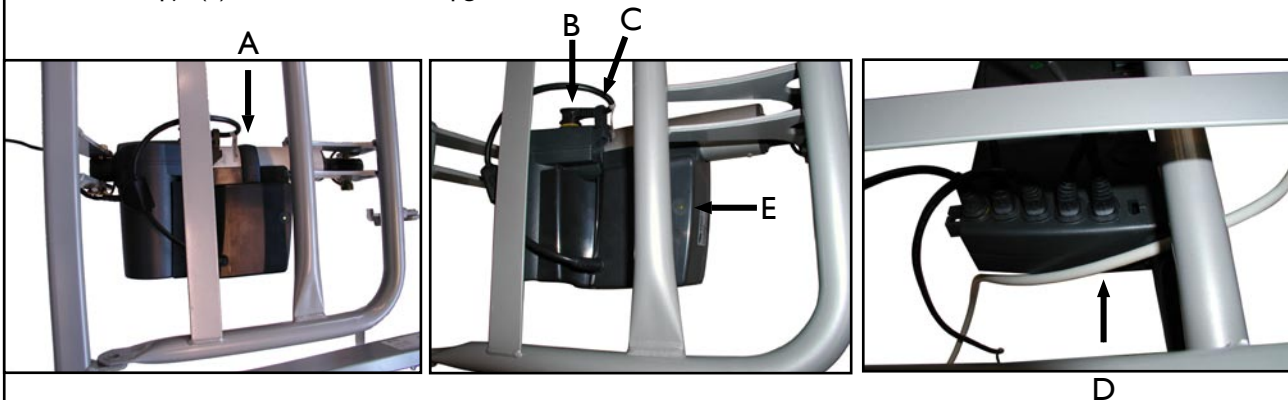

Preventief onderhoud

De accu's moeten na 4 jaar worden vervangen. Afhankelijk van de gebruikintensiteit moet de backup-accu mogelijk eerder worden vervangen. Regelmatig voorkomende, plotselinge ontladingen verkorten de levensduur van de backup-accu. Teneinde een optimale levensduur van het product te kunnen waarborgen, moet de bedieningseenheid zo vaak mogelijk worden aangesloten op de netspanning. Het is raadzaam de accu ten minste één keer per jaar te testen.

Vervanging van de accu

Accu's moeten altijd door een Invacare accu of een accu van hetzelfde type of mechanisch en elektrisch equivalente worden vervangen (12V - 1.3Ah).

De vervangende accu moet nieuw zijn en moet ten minste om de 6 maanden worden opgeladen.



Waarschuwing! De accudoos is voorzien van luchtopeningen die voor een adequate ventilatie van de doos moeten zorgen.

De luchtopeningen mogen niet worden afgedicht of afgedekt, aangezien dit tot overdruk en explosiegevaar kan leiden.

Afvoer van afval

Oude accu's kunnen aan Invacare® worden geretourneerd of op dezelfde wijze als autoaccu's worden afgevoerd.