


# Verkorte gebruikershandleiding

Invacare® | **Softform Premier Active 2 RX**

## Het volledige systeem bestaat uit:

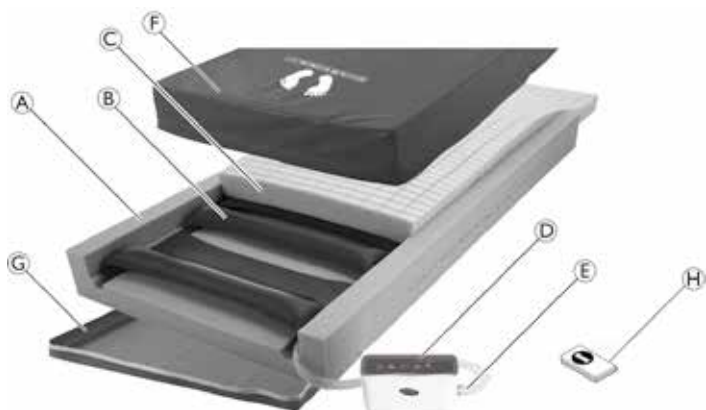


- A U-vorm, basislaag zonder groeven
- B Wisselend luchtcelinzetstuk
- C Inzetstuk met groeven
- D Bedieningseenheid die wordt bediend met een microprocessor
- E CPR-connector
- F Dampdoorlatende bekleding met meerdere stretchniveaus
- G Versterkte basis met PU-coating
- H Gebruikershandleiding


## Plaatsing matras op het bed

- Zorg dat de bedrukte zijde van de matrasbekleding naar boven is gericht.
- Zorg dat de afstand tussen het matrasoppervlak en de bovenkant van het zijhek minstens 22 cm is.
- Gebruikersgewicht 45 kg – 247,5 kg.

## Het systeem installeren

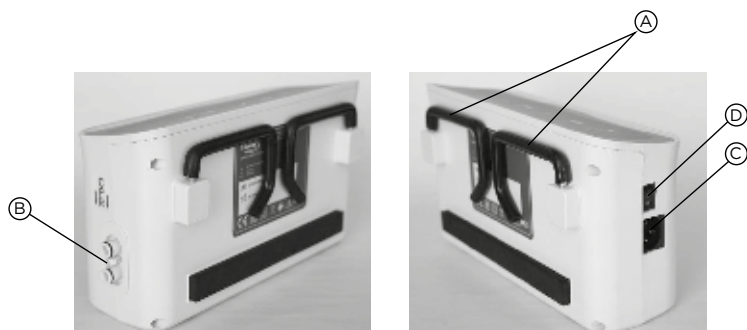


1. Hang de bedieningseenheid op aan de hand van de 2 ingebouwde hangers (A) aan het einde van het bed of plaats deze op een horizontaal oppervlak. (Als u de bedieningseenheid op de vloer plaatst, is dit niet van invloed op de werking, maar kan deze beschadigd raken.)
2. Sluit de CPR-slang (E) aan op luchtuitgangen op de matras en bedieningseenheid (B), en zorg er daarbij voor dat de slang niet is geknikt of gedraaid. Laat ruimte vrij voor de beddekken zodat deze vrij kunnen vallen.
3. Sluit de voedingskabel aan op de voedingsingang (C) van de bedieningseenheid en een geschikte voedingsbron.
4. Schakel de spanning van de voedingsbron in indien aanwezig.
5. Zet de mechanische schakelaar (D) aan de linkzijde van de bedieningseenheid op Aan. Er klinkt een vage enkele pieptoon en het lampje voor systeem in cyclus knippert terwijl het systeem wordt ingeschakeld.

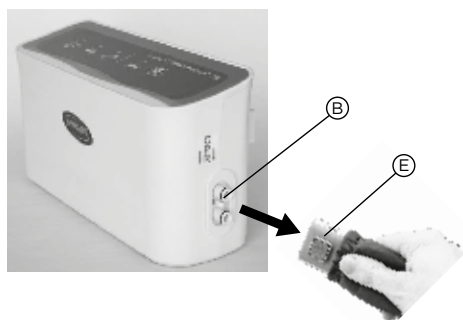

**Menuweergave  
bedieningseenheid**

Overzicht

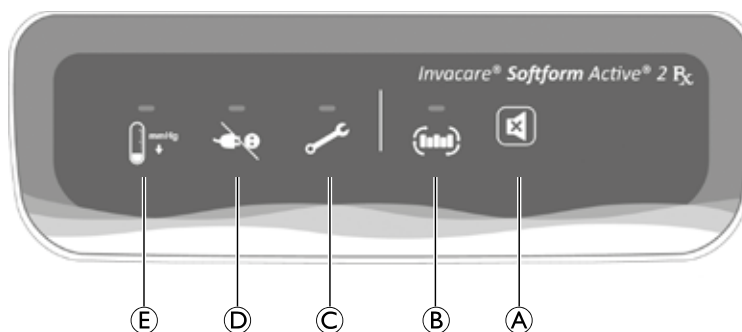

Pos.	Omschrijving	Functie
A	Dempknop	De relevante hoorbare/zichtbare indicator wordt ingeschakeld wanneer lage druk, stroomstoring of andere storing wordt herkend. Druk op de dempknop om het hoorbare signaal te dempen. De zichtbare indicator knippert totdat het probleem is opgelost. Als het aangegeven probleem niet binnen 10 minuten is opgelost, klinkt de indicator opnieuw. Druk op de dempknop om de hoorbare indicatie te dempen; de indicator klinkt niet opnieuw. Zie hoofdstuk 9 Problemen oplossen, pagina 207.
B	Systeem in cyclus / set-upindicator (operationeel ledlampje)	Groen ledlampje knippert terwijl systeem wordt ingesteld - ononderbroken groen brandend ledlampje geeft normaal operationeel aan.
C	Ander systeem / indicator timingstoring	Rood ledlampje knippert en hoorbare zoemer klinkt als het systeem een probleem met de cyclustijd herkent.
D	Indicator stroomstoring	Rood ledlampje knippert en hoorbare zoemer klinkt als het systeem geen voeding heeft. Dit kan het geval zijn bij een stroomstoring die bijvoorbeeld is veroorzaakt door het netsnoer los te koppelen of uitschakelen wanneer de bedieningseenheid werkt. Wanneer de netvoeding hersteld is, begint de bedieningseenheid automatisch te werken.
E	Drukstoring / indicator lage druk	Rood ledlampje knippert en hoorbare zoemer klinkt als het systeem een lagedrukstoring herkent.

**Bediening**

1. De voedingsindicator knippert en de bedieningseenheid gaat aanvankelijk naar de statische modus totdat de druk 15 mmHg bereikt. Vervolgens gaat de bedieningseenheid naar de alternatieve modus en blijft de voedingsindicator aan. De cyclustijd wordt ingesteld op 10 minuten en de druk wordt ingesteld op 60 ± 3 mmHg.

**i** De eerste keer opblazen van een nieuwe matras: de indicatorfunctie (zichtbare en hoorbare indicatoren) wordt geactiveerd als de matras niet binnen 15 minuten volledig is opgeblazen.


**Storingen in de werking**

- Tijdens de werking van de bedieningseenheid wordt de lagedrukindicator binnen 1 minuut geactiveerd als de luchtslangen zijn losgekoppeld of luchtcellen zijn gebroken.
- In het geval van abnormaal alternatief of geen alternatief wordt het hoorbare signaal geactiveerd en knippert de indicator voor een alternatieve storing.

**CPR-procedure**

Het Invacare® Softform Active® 2 Rx-matras is volledig getest op naleving van de huidige CPR-norm van 5 tot 6 cm compressiediepte. Dit werd op alle fasen van opgeblazen/leeggelopen behaald.

1. Houd de rode CPR-knop **(A)** ingedrukt.
2. Trek de slangaansluiting stevig van de bedieningseenheid **(B)**.
3. Schakel de bedieningseenheid uit.

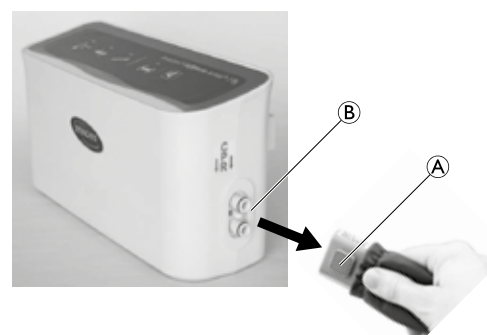

**i** Het matras begint leeg te lopen. De leeglooptijd is 20 seconden.

Onderhoud	Reiniging	Garantie
Haal de bekleding volledig los. Controleer de witte onderkant van de bekleding op vlekken. Vervang de verkleurde onderdelen.	1. Wassen op 80 °C. 2. Lichte bevulling: afnemen met 0,1% chlooroplossing of 70% alcohol. 3. Zware bevulling afnemen met 1% chlooroplossing Spoel bekleding na met met schoon water. 4. Drogen op 40 °C maximaal 10 minuten.	Motor 2 jaar. Hoes 4 jaar. Schuim 8 jaar.