

Invacare® Birdie® - Addendum

7.1.1 Controlelijst veiligheidsinspectie

Controles moeten worden uitgevoerd door een persoon met de juiste kwalificaties die goed bekend is met het ontwerp, het gebruik en het onderhoud van de patiëntenlift.

Datum van de inspectie:	Initialen:
HET ONDERSTEL MET DE ZWENKWIELEN	
☐ Controleer op ontbrekende onderdelen.	
☐ Onderstel zonder moeite uitklappen/inklappen.	
☐ Controleer of zwenkwielen en asbouten vastzitten.	
☐ Controleer of zwenkwielen onbelemmerd scharnieren en rollen.	
☐ Verwijder eventueel vuil van de wielen.	
☐ Controleer de draaipunten op slijtage.	
DE DRAAGBANDEN EN ONDERDELEN	
☐ Controleer bij elk gebruik alle bevestigingspunten van de draagband om een juiste bevestiging en de patiëntveiligheid te kunnen waarborgen.	
☐ Controleer het materiaal van de draagband op slijtage.	
☐ Controleer de bevestigingsbanden op slijtage.	
☐ Controleer de naden.	
DE ELEKTRISCHE ACTUATOR	
☐ Controleer of er lekkages zijn.	
☐ Controleer de onderdelen op de mast, hefboom en het onderstel.	
☐ Controleer op slijtage of verslechtering. Stuur het product terug naar de fabriek wanneer het is beschadigd.	
☐ Voer een cyclus uit om te controleren of de elektrische actuator zonder haperingen werkt.	

DE HEFBOOM

- ☐ Controleer alle onderdelen en de steunen van het tiljuk.
- ☐ Controleer op verbuigingen en afwijkingen.
- ☐ Controleer de moerverbindingen van de hefboom op slijtage.
- ☐ Controleer of de hefboom is gecentreerd tussen de poten aan het onderstel.
- ☐ Controleer de mastdraaibout. Controleer of de bout goed is vastgedraaid.
- ☐ Controleer de draaipunten op slijtage.
- ☐ Kijk of de veilige belasting zichtbaar op de hefboom is aangegeven.

DE MAST

- ☐ De mast moet stevig aan de hefboom zijn bevestigd.
- ☐ Controleer op verbuigingen en afwijkingen.
- ☐ Controleer de draaipunten op slijtage.

HET TIJLUK

- ☐ Controleer de bout/haken op slijtage of schade.
- ☐ Controleer de haken van de draagband op slijtage of verbuiging.
- ☐ Controleer de draaipunten op slijtage.
- ☐ Controleer de karabijnhaak op slijtage bij de contactpunten.
- ☐ Controleer of de karabijnhaak niet volledig kan draaien binnen de kunststof onderdelen. Indien dit het geval is, betekent dit dat de kunststof onderdelen versleten zijn en vervangen moeten worden. Zie afbeelding [Ⓐ].
- ☐ Controleer de gelaste pin die ter hoogte van de hefboom de karabijnhaak ondersteunt.
- ☐ Kijk of de veilige belasting zichtbaar op het tiljuk is aangegeven.

REINIGING

- ☐ Wanneer noodzakelijk.

Ⓐ

